

FloorBed[®] 1




FloorBed[™]
By Accora



FloorBed® 1

**Mindre
risiko for
skader**

FloorBed® har en samlet
højde på kun 15 cm,
inklusive madras. Det betyder,
at et sengefald bliver til et
sengerul, hvilket stort
set fjerner risikoen
for skader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner:	92 x 224cm	Højdeindstilling: (ekskl. madras)	7,1cm - 64cm
Størrelse på sengebunden:	90 x 200cm	Funktioner:	Rygstøtte, knæstøtte, Anti-Trendelenburg-position, Trendelenburg position
Vægtkapacitet:	180kg	Serienummer:	NSB-0-FL1-100
Maksimal brugervægt: (ved madras med en vægt på 10kg)	170kg		

Mindre plejebyrde

FloorBed® reducerer behovet for opsyn. Det betyder en mindre arbejdsbyrde for plejere.



Risikohånd tering

Øget sikkerhed for brugere, plejepersonale og arbejdsgivere gennem reduktion af risiko.



FLOORBED® EGENSKABER



Samlet højde på 15 cm, når den anvendes sammen med lavprofil-madrassen LowMatt™



Ingen ledninger, der kommer i vejen



Kan køres op i fuld plejehøjde



Skjulte hjul



Rygstøtte- og knæstøttefunktioner



Sengebundens højde er kun 7,1 cm – samme højde som en tennisbold

FLOORBED® EKSTRAUDSTYR



Integrerede sidestykker i bløde materialer



Sengestøttegreb til at øge bevægeligheden i sengen



Støtthåndtag til at øge bevægeligheden i sengen



Sikkerhedsmadrass, 22 cm i højden. Samme højde som en FloorBed® med en skummadras på 15 cm



Hoved- og fodgærde mindsker risikoen for stød og skader



Sikkerhedslagen, som mindsker risikoen for at blive fastklemt, da sengebundsmekanismen er beskyttet





Kan foldes sammen, så den er nem at transportere



Drejeligt sengestøttegreb, som giver ekstra støtte ved forflytning

Hvorfor vælge FloorBed®?

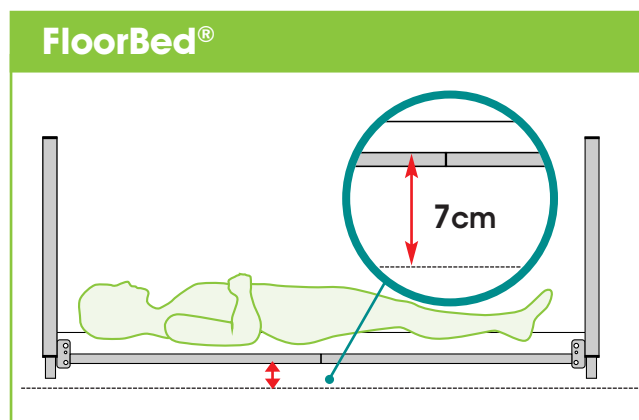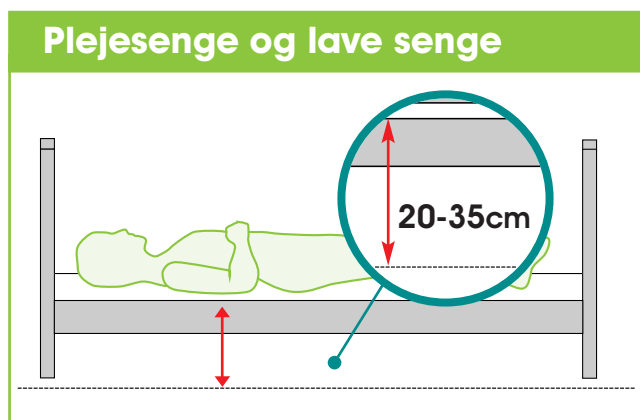


Hvornår skal du vælge FloorBed®?



FloorBed® er det rette valg til brugere, som:

- risikerer at falde ud af sengen
- har ukontrollerede bevægelser
- har problemer med at løfte benene og med at skifte fra seng til seng

Risiko for skader ved fald fra seng

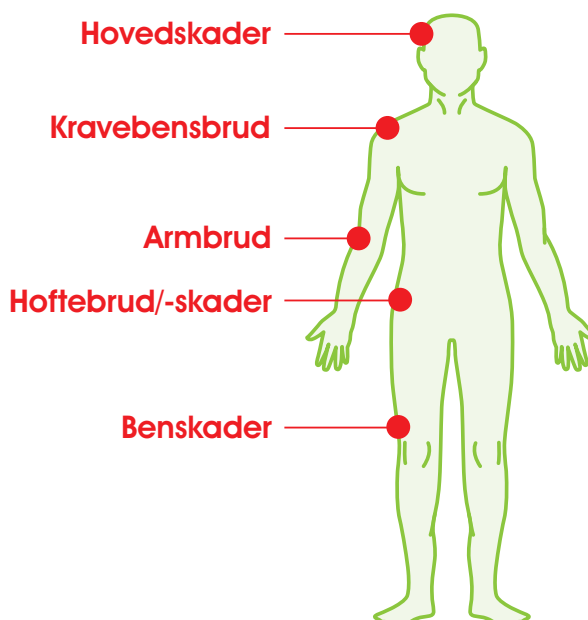

Casestudier



Toms historie

REDUKTION AF FALDULYKKER

Identificeret problemstilling:

Tom er en 92-årig mand, som fik diagnosen vaskulær demens i 2011. Han har en meget lille forståelse for sin egen funktionsdygtighed og en meget lav risikoerkendelse. Da Tom lå i en almindelig lav seng på 20 cm, oplevede han hyppige og livagtige hallucinationer og gav udtryk for at være bange for at falde fra et fly eller en båd. På trods af disse hallucinationer forsøgte Tom at stå ud af sengen på uhensigtsmæssige tidspunkter, hvilket resulterede i faldulykker. Selv ved brug af en faldmåtte medførte faldene skrammer og blå mærker, hovedskader og andre skader.

Efter installering af en FloorBed®

Efter at have fået en FloorBed® har Tom ikke forsøgt at stå ud af sengen overhovedet. Han har derfor ikke haft nogen fald fra sengen, og han er desuden blevet meget roligere i løbet af dagen og natten med færre og mindre intense hallucinationer. Toms kone mener, at det skyldes, at han nu føler sig meget mere sikker, når han er nødt til at være alene, hvilket har gjort ham mere rolig og afslappet.



Ethel's historie

REDUKTION AF SKADER

Identificeret problemstilling:

Ethel er en 93-årig kvinde, som fik diagnosen demens for cirka seks år siden. Hun har en meget lav risikoerkendelse og en meget lille forståelse for sine egne fysiske begrænsninger. Når hun var uden opsyn, forsøgte hun ofte at stå ud af sin lave standardseng. Hun har haft mange faldulykker, som har medført skader i form af blå mærker og skrammer, hovedskader og indvendige kvæstelser.

Efter installering af en FloorBed®

FloorBed® blev installeret, og selvom Ethel fortsat faldt ud af sengen, var der nu snarere tale om, at hun rullede ud, end at hun faldt. Der blev også tilføjet en udvidelse af sengen, idet man placerede en madras af standardhøjde ved siden af FloorBed®, hvilket gjorde risikoen for skader endnu mindre. Fordelen ved madrassen på gulvet var, at når Ethel rullede ud af sengen, rullede hun over på en blød og polstret overflade. En anden væsentlig fordel var, at det blev meget hurtigere og nemmere for hendes plejere at få hende tilbage i sengen ved hjælp af glidelagener, hvilket overflødiggjorde behovet for en lift eller andre løfteanordninger.



Fremstillet af:

Accora Ltd
Charter House
Barrington Road
Orwell
Cambridge, SG8 5QP

Tlf.: +44 01223 206100
Fax: +44 01223 206120
info@accora.uk.com
www.accora.uk.com

www.floorbed.com

JØHL

Distributør i Danmark,
JØHL-Firskovvej 6-2800 Kgs.
Lyngby-T: 39202007

Registered to ISO 9001:2008